



## HumatroPen® 12 mg

Sistema Inyector de Hormona de Crecimiento  
Dispositivo de Inyección para Utilizar con Cartuchos de Humatrop® (somatropina)

Sistema de administración de hormona de crecimiento  
Dispositivo de inyección para utilizar con los cartuchos de Humatrop® (somatropina)



PA0075PEY04

MU100320

12 mg

### MANUAL DEL USUARIO DE LA PLUMA MANUAL DE UTILIZAÇÃO DA CANETA

Lilly

#### Sección Secção

1

Lea esta sección completamente antes de comenzar.  
Luego, vaya a la Sección 2.

Leia esta secção até ao fim antes de começar.  
Depois avance para a Secção 2.

#### LO QUE NECESITA SABER SOBRE HUMATROPEN® 12 MG

Lea estas instrucciones cuidadosamente ANTES de usar Humatropen® 12 mg. Debe utilizar la Pluma correctamente para así obtener el mayor beneficio del tratamiento con Humatropen®. Si no sigue estas instrucciones completamente, se puede injectar mucho más o mucho menos Humatropen.

#### INTRODUCCIÓN

**Uso previsto**  
Humatropen 12 mg es una pluma inyectora reutilizable diseñada para la autoadministración de la hormona de crecimiento humana. La pluma inyectora está diseñada para usarse específicamente con Humatropen 12 mg Cartuchos y con agujas de la pluma de un solo uso, desmontable y desecharable (se suministran por separado).

**Contraindicaciones**  
No se conocen contraindicaciones para Humatropen 12 mg. Su médico lo ha prescrito la Pluma y la dosis de Humatropen que usted o su hijo debe recibir.

**NO CAMBIE la dosis o la Pluma a no ser que se lo indique su médico.**

Antes de usar su Humatropen 12 mg, asegúrese de haber leído cuidadosamente este Manual del Usuario de la Pluma. En él se explica cómo utilizar la Pluma y contiene una guía de resolución de problemas por si se surgen preguntas.

Estas instrucciones no sustituyen el hablar con su médico sobre su condición médica o su tratamiento. Si tiene preguntas o problemas a la hora de usar Humatropen 12 mg, contacte con su médico, farmacéutico o personal de enfermería, o con su filial de Lilly España (ver última página para detalles de contacto).

#### INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE HUMATROPEN 12 MG

- NO USE la Pluma si cualquier parte de la Pluma o del Cartucho está rota o dañada. Contacte con su médico, farmacéutico o personal de enfermería.
- Compruebe que su Cartucho de Humatropen 12 mg concuerda con la Pluma Humatropen 12 mg. Si no concuerda, NO LO USE y contacte con su médico, farmacéutico o personal de enfermería.
- Siga las instrucciones de la Sección 2 SOLAMENTE para la preparación de un nuevo Cartucho antes del primer uso.
- Se debe seguir la Sección 3 de este manual para cada inyección.
- **⚠ NO COMPARTA** su Humatropen 12 mg o las Agujas de la Pluma, ya que puede suponer un riesgo de transmisión de infecciones.
- No está recomendado utilizar Humatropen 12 mg por invidentes o por personas con dificultades de visión sin la ayuda de una persona con buena visión entrenada en su uso.

#### SOBRE LAS AGUJAS DE LA PLUMA

##### ¿Qué clase de Agujas se pueden utilizar con Humatropen 12 mg?

- No se incluyen las Agujas de la Pluma. Usted puede necesitar una receta para que su farmacéutico le proporcione las Agujas.
- Se recomiendan las Agujas de la Pluma Becton, Dickinson and Company (BD) para utilizarse con Humatropen 12 mg.
- La utilización del Cubreaguja con su Humatropen es opcional. Cuando utilice el Cubreaguja con su Humatropen, debe utilizar una Aguja de 5 mm de longitud o mayor.
- Consulte las instrucciones de Uso del Cubreaguja.
- Consulte con su médico, farmacéutico o personal de enfermería qué calibre y longitud de la Aguja son los mejores para usted.

##### Se debe utilizar una Aguja nueva para cada inyección?

- Sí, se debe utilizar una Aguja nueva para cada inyección.
- Deseche inmediatamente la Aguja después de cada inyección. Utilice una Aguja nueva para cada inyección. Esto ayudará a minimizar el riesgo de infección, prevenir pérdidas de Humatropen, evitar la aparición de burbujas de aire y reducir obstrucciones de la Aguja.

##### ¿Cómo debo desechar las Agujas?

- Deseche las Agujas como le haya indicado su médico, farmacéutico o personal de enfermería.

#### CUIDADOS Y CONSERVACIÓN DE HUMATROPEN 12 MG

##### Cuidados

- Las partes sucias pueden limpiarse con un paño húmedo. NO UTILICE alcohol ni otros agentes de limpieza.
- • NO APLIQUE aceite ni otro lubricante.
- Conserve Humatropen 12 mg entre -40 °C y 70 °C sin el cartucho de Humatropen 12 mg (somatropina).
- Conserve Humatropen 12 mg con el Cartucho de Humatropen puesto, en la nevera, dentro de su estuche, hasta la siguiente inyección. NO CONGELAR.
- Para ver las condiciones de almacenamiento completas, consulte el Prospecto del Cartucho de Humatropen.
- Deje Humatropen 12 mg con el Cartucho de Humatropen puesto durante 10 minutos a temperatura ambiente antes de inyectarse. Puede sentir molestias en el lugar de inyección si se inyecta Humatropen frío.
- La exposición a temperatura ambiente no debe ser mayor de 30 minutos diarios.
- NO CONSERVE la Pluma con la Aguja puesta.

#### SUSTITUCIÓN y ELIMINACIÓN DE LA PLUMA

No utilice su pluma durante más de 3 años después del primer uso o después de la fecha de uso del envase, lo que ocurre primero.

La pluma caducada puede desecharse en la basura de su casa después de haber quitado la aguja. Pregunte a su médico, farmacéutico o personal de enfermería sobre las opciones de eliminación de la pluma de forma correcta.

Registre aquí la fecha en que la Pluma se usó por primera vez: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

Registre aquí la fecha de uso de su envase: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

Contacte con su médico, farmacéutico o personal de enfermería si necesita un nuevo Humatropen 12 mg.

**⚠ Por favor lea el prospecto completo de Humatropen. Para más información contacte con su médico, farmacéutico o personal de enfermería, o con su filial local de Lilly en Portugal (ver última página para detalles de contacto).**

#### SUBSTITUIÇÃO e ELIMINAÇÃO DA CANETA

No utilize una caneta más de 3 años após a data da primeira utilização ou após a data "usar por" da cartonagem, o que ocorrer primeiro.

A caneta caducada pode ser descartada no lixo da sua casa depois de ter removido a aguja.

Pergunte ao seu médico, farmacéutico ou enfermeiro sobre as opções de eliminação da caneta da forma mais correcta.


Registre aqui a data em que utilizou uma caneta pela primeira vez: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

Registre aqui a data "usar por" da cartonagem: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.


Contacte o seu médico, farmacéutico ou enfermeiro se precisar de uma nova Humatropen 12 mg.

**⚠ Por favor leia por completo o Folheto Informativo para o doente de Humatropen. Para quaisquer informações adicionais, contacte o seu médico, farmacéutico ou enfermeiro ou a filial local da Lilly em Portugal (ver última página com os detalhes de contacto).**

#### PARTES DE LA PLUMA HUMATROPEN 12 MG COMPONENTES DA CANETA HUMATROPEN 12 MG

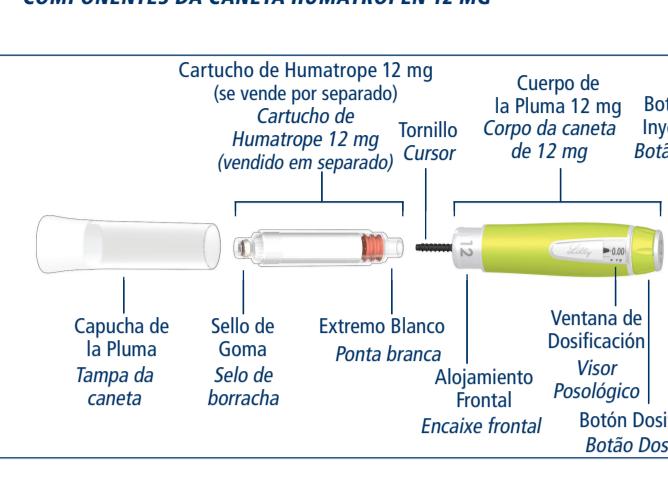

#### PARTES DE LA AGUJA DE LA PLUMA (NO SE INCLUYEN LAS AGUJAS DE LA PLUMA) COMPONENTES DAS AGULHAS (AS AGULHAS NÃO ESTÃO INCLUIDAS)

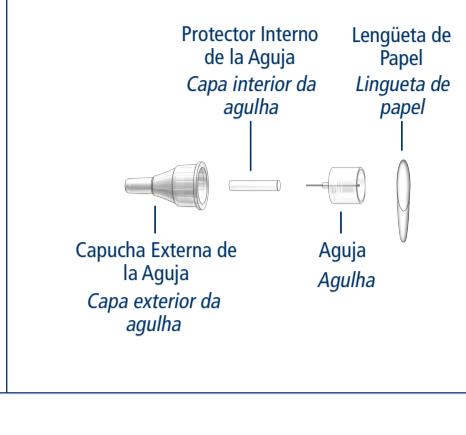

#### Sección Secção

2

Lea y siga las instrucciones de esta sección solo después de haber leído la Sección 1.

Leia e siga as instruções desta secção apenas depois de ter lido a Secção 1.

#### COMENZANDO

**⚠ Asegúrese de seguir las directrices de reconstitución (mezclado) indicadas en el envase del Cartucho de Humatropen. Realice la Preparación del Nuevo Cartucho solamente una vez, al comenzar con cada nuevo cartucho. Para uso diario, **NÓ REPITA** la Preparación del Nuevo Cartucho. Si lo hace, puede quedarse sin Humatropen antes de tiempo.**

**⚠ Certifique-se de que segue as instruções de reconstituição (mistura) tal como descrito na embalagem do cartucho de Humatropen. Faça a preparação do novo cartucho apenas uma vez, no início de cada novo cartucho. Para uso diário, **NÓ REPITA** a preparação do novo cartucho. Se o fizer, pode ficar sem Humatropen mais cedo do que o previsto.**

#### PREPARACIÓN DEL NUEVO CARTUCHO

##### PASO A – COMPRUEBE LA PLUMA Y EL CARTUCHO



Asegúrese de comprobar en el Cartucho:  

- La Etiqueta del Cartucho de 12 mg
- La fecha de caducidad
- Que el contenido sea transparente y libre de partículas

**NOTA**

NO UTILICE la Pluma si cualquier parte de la Pluma o del Cartucho está rota o dañada. Contacte con su médico, farmacéutico o personal de enfermería.

Certifique-se de que verifica o cartucho no que diz respeito:

- Ao rótulo do cartucho de 12 mg
- Ao prazo de validade
- Ao conteúdo que deve estar limpo e livre de partículas

**NOTA**

NÃO UTILIZE a caneta se qualquer parte da caneta ou do cartucho estiver partida ou danificada. Contacte o seu médico, farmacéutico ou enfermeiro ou a Lilly Portugal.

#### PREPARAÇÃO DE UM NOVO CARTUCHO

##### ETAPA A – VERIFIQUE A CANETA E O CARTUCHO



Mirar el Botón de Inyección y el Alojamiento Frontal para confirmar que se trata de una Pluma de 12 mg.

**⚠ COMPROBAR**  
Comprove que o número sobre o Alojamento Frontal se corresponde com a concentração do Cartucho que aparece na etiqueta do Cartucho. Se a caneta e o cartucho não coincidem, contacte com o seu médico, farmacéutico ou personal de enfermería.

Retire a tampa da caneta.

Veja o botão injector e o encaixe frontal para confirmar de que se trata de uma caneta de 12 mg

**⚠ VERIFIQUE**  
Verifique se o número no encaixe frontal está de acordo com a dosage inscrita no rótulo do cartucho. Se a caneta e o cartucho não condizem, contacte o seu médico, farmacéutico ou enfermeiro ou a Lilly Portugal.

#### PASO B – PONGA EL CARTUCHO



Utilice el Extremo Blanco del Cartucho para empujar hacia atrás el Tornillo.

**NOTA**

Puede que el Tornillo no esté hacia afuera cuando se le proporcione la Pluma.

#### ETAPA B – ENROSQUE O CARTUCHO



Presione el Extremo Blanco del Cartucho reconstituido sobre el Cuerpo de la Pluma de 12 mg sobre el Cartucho hasta que quede fijo.

**NOTA**

Si el Cartucho no está completamente enroscado en la Pluma, puede que el Tornillo no se mueva, y se administre una dosis incorrecta.

Utilize a punta blanca do cartucho para empurrar o cursor para trás.

**NOTA**


O cursor pode não estar no exterior quando pegar na caneta.

Empurre a punta blanca do cartucho reconstituído para dentro da caneta. Enrosque o corpo da caneta de 12 mg no cartucho até estar fixo.

**NOTA**

Se o Cartucho não estiver completamente enroscado, o cursor pode não se mover e pode ser administrada uma dose incorrecta.


#### PASO C – PONGA LA AGUJA

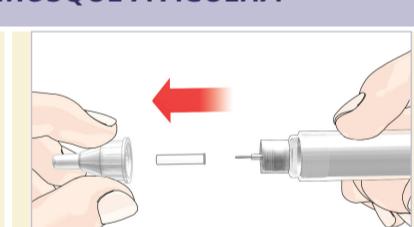

Retire la Lengüeta de Papel de la Capucha Externa de la Aguja.

Retire a lingüeta de papel da capa exterior da aguja.

#### ETAPA C – ENROSQUE A AGUILHA

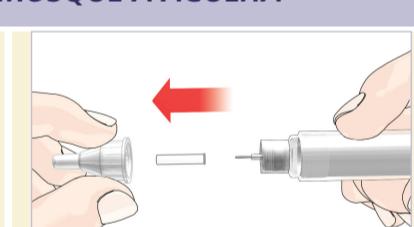

Empurre a aguja com firmeza para dentro do cartucho de 12 mg e rode no sentido dos ponteiros do relógio até ficar fixa.

Empurre a aguja com firmeza para dentro do cartucho de 12 mg e rode no sentido dos ponteiros do relógio até ficar fixa.

• Retire la Capucha Externa y el Protector Interno de la Aguja.

• Gire la Capucha Externa de la aguja para retirar la Aguja después de la inyección.

• Retire a capa exterior e a capa interior da aguja.

• Gire a capa exterior da aguja para retirar a aguja após a injeção.

• Marque 2,50 mg.

• Aponte a aguja hacia arriba.

• Presione el Botón de Inyección y manténgalo presionado durante cinco segundos.

## Sección Secção

**3**

Una vez hecha la Preparación del Nuevo Cartucho siga la Sección 3 para todas sus inyecciones.  
Agora que fez a preparação do novo cartucho, siga a Secção 3 sempre que fizer as suas administrações.

### USO DIARIO

#### PASO 1 – COMPRUEBE LA PLUMA



Retire la Capucha de la Pluma.

**NOTA**

NO UTILICE la Pluma si cualquier parte de la Pluma o del Cartucho está rota o dañada. Contacte con su médico, farmacéutico o personal de enfermería.

Retire a tampa da caneta.

**NOTA**

NÃO UTILIZE a caneta se qualquer parte da caneta ou do cartucho estiver partida ou danificada. Contacte o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.

### UTILIZACIÓN DIÁRIA

#### ETAPA 1 – VERIFIQUE A CANETA



Asegúrese de comprobar en el Cartucho:

- La Etiqueta del Cartucho de 12 mg
- La fecha de caducidad
- Que el contenido sea transparente y libre de partículas



Mire el Botón de Inyección y el Alojamiento Frontal para confirmar que se trata de una Pluma de 12 mg.

**COMPROBAR**

Compruebe que el número sobre el Alojamiento Frontal se corresponde con la concentración del Cartucho que aparece en la etiqueta del Cartucho. Si la Pluma y el Cartucho no coinciden, contacte con su médico, farmacéutico o personal de enfermería.

Veja o botão injector, e encaixe frontal para confirmar que se trata de uma caneta de 12 mg.

**VERIFIQUE**

Verifique se o número no encaixe frontal está de acordo com a dosagem do rótulo do cartucho. Se a caneta e o cartucho não coincidirem, contacte o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.


#### PASO 2 – PONGA LA AGUJA



• Retire la Lengüeta de Papel de la Capucha Externa de la Aguja.



Presione la Aguja en linea recta sobre el Cartucho de 12 mg y enróquela en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté fija.

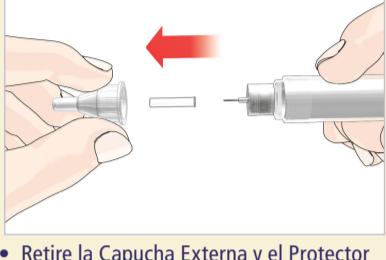

• Retire la Capucha Externa y el Protector Interno.

La utilización del Cubreagujas con su Humatropen es opcional. Cuando utilice el Cubreagujas con su Humatropen, debe utilizar una Aguja de 5 mm de longitud o mayor. Consulte las Instrucciones de Uso del Cubreagujas.

• Retire la lengüeta de papel de la capa exterior de la aguja.

Empuje a aguja com firmeza para dentro do cartucho de 12 mg e rode no sentido dos ponteiros do relógio até ficar fixa.

• Retire a capa exterior e a capa interior da aguja.

• Guarde a capa exterior da aguja para retirar a aguja após a injeção.

**NOTA**

A utilização da cobertura para esconder a aguja com Humatropen é opcional. Quando utilizar a cobertura para esconder a aguja com a sua Humatropen, deve utilizar uma aguja de 5 mm de comprimento ou maior. Consulte as Instruções de Utilização da Cobertura para esconder a aguja.

#### PASO 3 – MARQUE E INYECTE LA DOSIS



Gire el Botón Doseador hasta la dosis deseada.

**EJEMPLO**

En el dibujo arriba representado se muestra a 0,50 mg.

Si marca más dosis de la deseada, puede corregir la dosis girando el botón doseador en sentido contrario.


El botón doseador hace clic mientras gira. NO marque su dosis contando los clics porque puede marcar la dosis equivocada.



Coloque su dedo pulgar en el Botón de Inyección, luego presione despacio y de manera firme el Botón de Inyección hasta que se pare.

Continúe presionando el Botón de Inyección durante cinco segundos y luego retire la Aguja de la piel.

Para confirmar que ha recibido la dosis completa, asegúrese de que ve un 0,00 en la Ventana de Dosisificación.

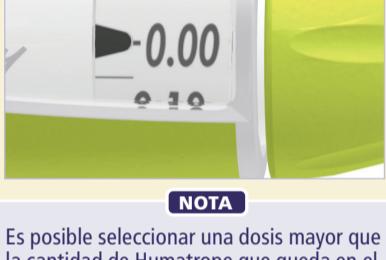

Al final de la inyección, el número que aparece en la Ventana de Dosisificación debe ser 0,00.

Si no es así, la cantidad que aparece es la cantidad de Humatrop que NO ha recibido.

Consulte a su médico, farmacéutico o personal de enfermería sobre cómo manejar una dosis parcial. Retire la Aguja y el Cartucho vacío.

Para el siguiente uso diario, ponga un nuevo Cartucho como se muestra en la Sección 2, Paso A, y continúe con la Preparación del Nuevo Cartucho (Sección 2).

**NOTA**

Es posible marcar una dosis superior a la cantidad de Humatrop que quedó en el cartucho.

No final de inyección, el número no mostrador posológico deberá ser 0,00. Se no es así, será la cantidad de Humatrop que NÃO administró.

Consulte a seu médico, farmacêutico ou enfermeiro para saber como manusear uma dose parcial. Retire a aguja e o cartucho vazio.

Para a utilização diária seguinte, enrosque um novo cartucho conforme indicado na Secção 2, Etapa A e continue com a Preparação de um novo cartucho (Seção 2).

Rode el botón doseador até la dosis pretendida.

**EXEMPLO**

0,50 mg conforme a figura acima. Se rodar el botón para allá de la dosis deseada, podrá corrigirla, rodando el botón doseador en sentido contrario.

El botón doseador hace clic mientras gira. NO marque su dosis contando los clics porque puede marcar la dosis equivocada.

Insira a aguja tal como indicado pelo seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.

Coloque o polegar no botão injector, e empurre o botão injector para baixo devagar e com firmeza, até parar.

Continue a carregar no botão doseador durante 5 segundos e retire então a aguja da pele.

Certifique-se que ve 0,00 no Mostrador posológico para confirmar que administrou a dose completa.


É possível marcar uma dose superior à quantidade de Humatrop que ficou no cartucho.

No final da injeção, o número no mostrador posológico deverá ser 0,00. Se não for, essa será a quantidade de Humatrop que NÃO administró.

Consulte o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro para saber como manusear uma dose parcial. Retire a aguja e o cartucho vazio.

Para a utilização diária seguinte, enrosque um novo cartucho conforme indicado na Secção 2, Etapa A e continue com a Preparação de um novo cartucho (Seção 2).

#### PASO 4 – RETIRE Y DESECHE LA AGUJA

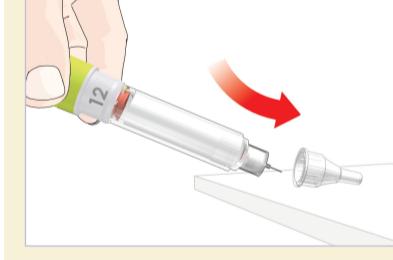

• NO CONSERVE la Pluma con una Aguja puesta – esto ayudará a prevenir que entre aire en el Cartucho.

• NO RETIRE el Cartucho de la Pluma hasta que esté vacío o necesite ser reemplazado – esto ayudará a evitar la posibilidad de administrar una dosis incorrecta.

Retire la Aguja con la Capucha Externa de la Aguja girándola en el sentido contrario a los agujos del reloj.

Coloque las agujas usadas en un contenedor de objetos punzantes o en un recipiente de plástico que no tiene tapa sellada. No tire agujas directamente a la basura ni en la misma. No recicle el contenedor de objetos punzantes lleno. Pregunte a su médico, farmacéutico o personal de enfermería sobre las opciones para desechar correctamente el contenedor de objetos punzantes.

Vuelva a colocar la Capucha de la Pluma.

**NOTA**

• NÃO GUARDE a caneta com a aguja enrosada – isto ayudará a evitar que o ar entre no cartucho.

• NÃO RETIRE este cartucho da caneta até estar vacío ou necesitar de ser substituido - isto ayudará a evitar la administración de una dosis incorrecta.

**EXEMPLO**

Con cuidado, volte a colocar la capa exterior de la aguja tal como o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro lhe ensinou.

Retire a aguja com a capa rotando no sentido contrário ao dos ponteiros del reloj.

Coloque as agujas usadas num recipiente de plástico rígido com uma tampa sellada. Não jogue agujas diretamente no lixo doméstico. Não recicle o recipiente cheio para objetos cortantes.

Pergunte ao seu médico, farmacêutico ou pessoal de enfermagem sobre as opções para deitar fora o recipiente de objetos cortantes corretamente.

Reponha a tampa na caneta.

**NOTA**

• NO GUARDE a caneta com a aguja enrosada – isto ayudará a evitar que o ar entre no cartucho.

• NÃO RETIRE este cartucho da caneta até estar vacío ou necesitar de ser substituido - isto ayudará a evitar la administración de una dosis incorrecta.

#### PASO 5 – CONSERVE LA PLUMA Y EL CARTUCHO PARA EL SIGUIENTE USO

Conserve adecuadamente la pluma Humatropen 12 mg. (Para más información, ver "Cuidados y Conservación de Humatropen 12 mg" en la Sección 1 de este Manual del Usuario de la Pluma.)

Cuando le corresponda recibir la siguiente dosis, vaya a la Sección 3 y repita los Pasos 1-5.

#### ETAPA 5 – GUARDE LA CANETA E O CARTUCHO PARA LA PRÓXIMA UTILIZACIÓN

Guarde a Humatropen 12 mg apropiadamente. (Para más informaciones veja "Cuidados e Conservação da Humatropen 12 mg" na Secção 1 deste Manual de Utilização da Caneta)

Quando for altura da sua próxima dose, vá até à Secção 3, e repita as etapas 1-5.

**NOTA**

• NO CONSERVE la Pluma con una Aguja puesta – esto ayudará a prevenir que entre aire en el Cartucho.

• NO RETIRE el Cartucho de la Pluma hasta que esté vacío o necesite ser reemplazado – esto ayudará a evitar la posibilidad de administrar una dosis incorrecta.

**3**

**4**

## Sección Secção

**4**

## Sección Secção

### PREGUNTAS FRECUENTES

#### 1. ¿Necesito realizar la Preparación del Nuevo Cartucho antes de cada dosis?

- No. La Preparación del Nuevo Cartucho se realiza una sola vez para cada Cartucho, justo antes de que se utilice un nuevo Cartucho por primera vez.
- El propósito de la preparación es asegurar que la pluma Humatropen 12 mg con el cartucho de Humatropen 12 mg estén listos para su uso.
- Si repite la Preparación del Nuevo Cartucho antes de cada uso, puede que se acabe Humatropen antes de tiempo. La pequeña cantidad de producto utilizado en la Preparación del Nuevo Cartucho no afecta a la cantidad total de Humatropen.

#### 2. ¿Qué debo hacer si la Etiqueta del Cartucho y la Pluma no coinciden?

- NO UTILICE la Pluma si la concentración del Cartucho que figura en la etiqueta del Cartucho de Humatropen no coincide con el número que figura en el Alojamiento Frontal de la Pluma. Si la Pluma y el Cartucho no coinciden, contacte con su médico, farmacéutico o personal de enfermería para recibir ayuda o para obtener un recambio.

#### 3. ¿Qué debo hacer si Humatropen no es transparente después del mezclado?

- Asegúrese de dar la vuelta a la Pluma hacia arriba y hacia abajo con cuidado 10 veces. NO AGITAR. A continuación, deje reposar la Pluma durante al menos tres minutos. Si la solución permanece turbia o presenta partículas, vuelva a dar la vuelta a la Pluma con cuidado hacia arriba y hacia abajo 10 veces más. Deje reposar la Pluma durante cinco minutos más.
- Si la solución sigue turbia o contiene partículas después de la reconstitución (mezclado), NO UTILICE. Contacte con su médico, farmacéutico o personal de enfermería para obtener ayuda.

#### 4. ¿Por qué hay burbujas de aire en el Cartucho?

- Pueden quedar burbujas de aire en el Cartucho después de la reconstitución (mezclado).
- Si la Pluma se almacena con una Aguja puesta, pueden formarse burbujas de aire en el Cartucho. NO CONERVE la Pluma con la Aguja puesta.
- Realice la Preparación del Nuevo Cartucho para eliminar las burbujas de aire del Cartucho.
- Una pequeña burbuja de aire es normal. No le hará daño ni afectará a su dosis.

#### 5. ¿Por qué el Tornillo de la Pluma no sale cuando el Cartucho no está puesto en la Pluma?

- El Tornillo puede no salir cuando presiona el Botón de Inyección a menos que haya un Cartucho en la Pluma. Esta característica permite presionar fácilmente el Tornillo hacia el Cuerpo de la Pluma cuando reemplaza un Cartucho.
- Una vez que el Cartucho esté puesto, el Tornillo saldrá cuando se presione el Botón de Inyección.

#### 6. ¿Qué debo hacer si no puedo poner el Cartucho en el Cuerpo de la Pluma?

- Compruebe que el Cartucho no esté dañado o roto.
- Alinee cuidadosamente el Cuerpo de la Pluma y enrosquelo hasta que esté fijo. Si el Cartucho y la Pluma no se pueden enroscar juntos, contacte con su médico, farmacéutico o personal de enfermería.

#### 7. ¿Por qué es difícil empujar el Botón de Inyección cuando intento inyectar la dosis?

- La Aguja puede estar obstruida. Intente poner una nueva Aguja.
- Si presiona el Botón de Inyección rápidamente puede hacer que el Botón de Inyección sea más difícil de presionar. Si presiona el Botón de Inyección